

タッチエリア（ゲート版）

取扱説明書

タッチエリア（ゲート版）（以下本製品）をご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
どうぞございます。

本製品は皆様のお声を頂戴しつつ常に品質の向上に取り組んで参ります。  
その為、本取扱説明書と本製品の絵柄や機能などに相違がある場合がございます。  
このような場合は大変お手数をおかけいたしますが、下記のサポートサイトより最新  
の取扱説明書をダウンロードいただけますようお願い申し上げます。

また、本製品につきましてお気づきの点などございましたら販売店またはサポ  
ートサイトよりお知らせいただきますようお願い申し上げます。  
今後も本製品を末永くご活用いただけますようお願い申し上げます。

### ■ 目次

01. 目次
  02. ご注意と動作環境
  03. 運用の流れ
  04. ログイン
  05. 利用者一覧
  06. 担当者一覧
  07. 担当者詳細
  08. 利用者詳細
  09. パスワード変更
  10. 検知履歴
  11. タグ確認
  12. タグ検索
-

### ■ 大切なご注意

1. 本製品は単独ではお使いいただけません。  
シール式ラベルタグと管理画面、警報メール受信用携帯電話とセットで機能いたします。
2. パスワードや個人情報について。  
システムに記入される個人情報やパスワードについては第三者に知られる事のないように大切にお使いいただきますようお願い申し上げます。
3. 本システムのセンサおよびケースは防水ではありません。

### ■ 動作環境


1. 玄関付近に設置するセンサ
  - ・液体及び降雨等にさらさない。
  - ・極端な埃や土煙にさらさない。
  - ・屋内設置。
2. 管理画面
  - ・インターネット環境がある事。
  - ・Windows Internet Explorer11以上。
  - ・Safari
  - ・上記以外のブラウザ：特に制限はありませんが、お使いの環境によっては対応しない場合がございます。
3. シール式ラベルタグ
  - ・肌へ直接貼らないでください。
  - ・金属に直接貼らないでください。
  - ・水や液体が付着した場合、速やかにふき取ってください。

#### ■ 故障時の対応

本製品はお客様の故意過失などによる故障を除き、リース期間中のハードウェア保証がございます。万一故障などが発生した場合、誠にお手数をおかけいたしますが販売店または担当者までお知らせくださいませ。

なお、本製品WEB画面につきましては随時アップデートがされる場合がございます。本製品サポートサイトも合わせてご覧いただきますようお願い申し上げます。

サポートサイト : <http://support.toucharea.jp/>

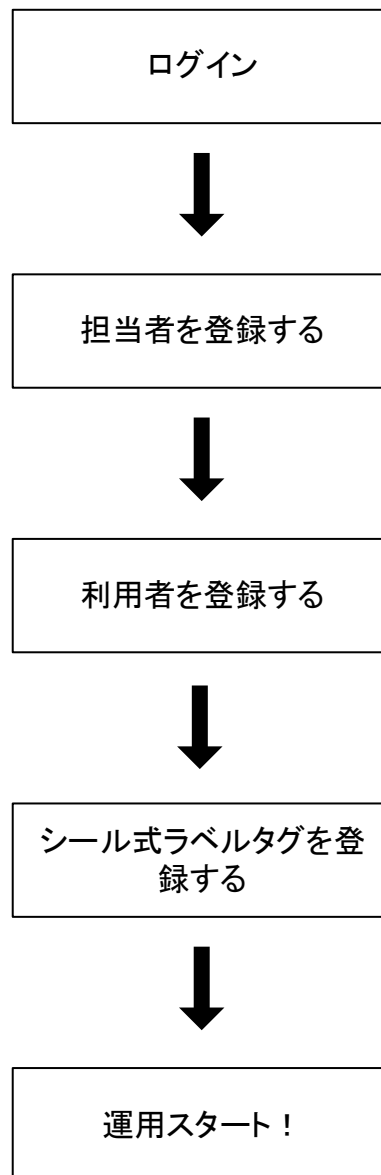

※担当者登録と利用者登録はどちらが先でも問題はありません。しかし利用者登録時に担当者一覧より担当者を選ぶことができますので、先に担当者を登録しておいた方がお手間を省くことができます。

※担当者、利用者、シール式ラベルタグの登録や変更・削除はいつでも行うことができます。

### 管理画面

ユーザID

パスワード

ログイン

Copyright(c) 2015 LIFE CO., LTD. All Rights Reserved.

1. 設定情報に記載されたアドレスを開きます。

例) <http://gate.toucharea.jp/life/>

2. 正しいアドレスの場合、上記のログイン画面が表示されます。

3. 設定情報に記載された「ユーザID」「パスワード」を入力します。

※ユーザID、パスワードはすべて半角小文字の英語と数字です。

4. 「ログイン」ボタンをクリックします。

## 05 利用者一覧（ログイン後の最初の画面になります）

Touch Gate V1.0.0α1

### \* 利用者一覧

全表示 新規登録 削除 確定 一括開始 一括停止 担当者一覧 ICセンサー一覧 タグ確認 タグ検索 パスワード変更  
ログアウト  検索

<前へ 次へ>

<input type="checkbox"/> ▲ ▼	ID	お名前	担当	メモ	最終受信場所	開始	停止	編集	タグ登録	履歴表示
<input type="checkbox"/>	1	山田太郎		<input type="text" value="20160401ライフ病院へ"/>	正面玄関1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="登録"/>	<input type="button" value="表示"/>
<input type="checkbox"/>	6			<input type="text"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="登録"/>	<input type="button" value="表示"/>
<input type="checkbox"/>	7			<input type="text"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="登録"/>	<input type="button" value="表示"/>
<input type="checkbox"/>	8			<input type="text"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="登録"/>	<input type="button" value="表示"/>

<前へ 次へ>

Copyright © 2015 LIFE CO., LTD. All Rights Reserved.

1. ログイン後の最初の画面になります。また、各機能を設定編集後に戻ってくる「ホーム」としても使います。

- 「新規登録」 : 利用者を登録します。
- 「削除」 : 利用者を削除します。対象利用者名左側の□にチェックを入れて「削除」ボタンをクリックすると利用者を削除することができます。
- 「確定」 : 「開始」や「停止」を確定します。「開始」か「停止」を選び、その後対象利用者名 左側の□にチェックを入れて「確定」ボタンをクリックします。
- 「一括開始」「一括停止」 : 複数利用者を一括して「開始」「停止」できます。対象利用者名左側の□にチェックをいれていずれかをクリックすると、まとめて決定することができます。
- 「担当者一覧」 : センサがタグを検知した場合のメール送信先です。
- 「ICセンサー一覧」 : 施設内に設置したセンサー一覧を表示します。
- 「タグ確認」 : 利用者に設定したタグ一覧を表示します。対象利用者名 左側の□にチェックを入れてクリックすると、一覧が表示されます。
- 「タグ検索」 : タグがすでに登録されたものかチェックすることができます。
- 「パスワード変更」 : ログインパスワードを変更することができます。
- 「ログアウト」 : システムからログアウトします。
- 「検索」 : 利用者を検索します。お名前の一部分が合致すれば表示されます。

Touch Gate V1.0.0α1

### \* 担当者一覧

一覧へ戻る

全表示

新規登録

削除

一括開始

一括停止

テスト送信

確定

ログアウト

<前へ 次へ>

<input type="checkbox"/> ▲ ▼	メールアドレス	担当	メモ	開始	停止	編集
<input type="checkbox"/>	@docomo.ne.jp		<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="編集"/>
<input type="checkbox"/>	@oiss.co.jp		<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="編集"/>
<input type="checkbox"/>	@quartz.ocn.ne.jp		<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="編集"/>

<前へ 次へ>

Copyright(c) 2015 LIFE CO., LTD. All Rights Reserved

センサがタグを検知した場合のメール送信先です。

新しく登録する場合は「新規登録」をクリックします。

担当者を登録しても、メール送信先として選択しない場合（来月入職する方や休職中の方など）、登録後担当者一覧表内の「停止」にしておくともメール送信先として選択できないようになります。

担当者のメールアドレス変更は担当者一覧内の「編集」をクリックします。

### \* 担当者詳細

一覧へ戻る

確定

ログアウト

担当者名

連絡先

メールアドレス

テスト送信

メモ

システム運用に必要な項目は「担当者名」「メールアドレス」の2つです。  
「連絡先」「メモ」はお好みに応じてお使いください。

なお、メールアドレスを登録されたのち、必ず「テスト送信」をクリックしてメールが届くかテストをお願いいたします。



### \* 利用者詳細

一覧へ戻る

確定

ログアウト

お名前

連絡先

担当

送信先

テスト送信

送信先2

テスト送信

送信先3

テスト送信

メモ

システム運用に必要な項目は「お名前」「送信先」の2つです。  
他はお好みに応じてお使いください。

送信先は3つ選択記入する必要はありません。  
1つあれば運用できます。

なお、担当者を選択記入されたのち、必ず「テスト送信」をクリックしてメールが届くかテストをお願いいたします。

## 09 パスワード変更

Touch Gate V1.0.0α1

### \* 利用者修正

[一覧へ戻る](#) [確定](#) [ログアウト](#)

ユーザ名

パスワード

確認パスワード

[一覧へ戻る](#) [確定](#) [ログアウト](#)

パスワードを変更することができます。

パスワード変更は責任者の方のみが行われることをお勧めいたします。

## 10 検知履歴

Touch Gate V1.0.0α1

### \* 履歴一覧

一覧へ戻る

全表示

履歴出力

ログアウト

山田太郎

<前へ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 次へ > >>

日時 ▲ ▼	件名	補足	センサID	場所	タグNo
2016-02-09 15:46:27	通過検知		life01	正面玄関1	3000300833b2ddd90140000000000000
2016-02-09 18:09:29	通過検知		life01	正面玄関1	3000300833b2ddd90140000000000000
2016-02-09 18:27:23	通過検知		life01	正面玄関1	3000300833b2ddd90140000000000000
2016-02-09 18:32:39	通過検知		life01	正面玄関1	3000300833b2ddd90140000000000000
2016-02-09 19:00:31	通過検知		life01	正面玄関1	3000300833b2ddd90140000000000000

<前へ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 次へ > >>

ある利用者に対してセンサが検知した履歴を表示します。

画面上部の「履歴出力」をクリックするとエクセル形式で出力することもできます。

## 11 タグ確認

Touch Gate V1.0.0α1

### \* タグ確認

[一覧へ戻る](#)

[ログアウト](#)

<前へ 次へ>

ID	お名前	タグID
1	山田太郎	3000300833b2ddd90140000000000000

<前へ 次へ>

Copyright(c) 2015 LIFE CO., LTD. All Rights Reserved.

ある利用者に登録されているタグを確認することができます。

1人の利用者に対して、何枚でもタグを登録することができます。  
例) 杖、スリッパ、かばんなど。

## 12 タグ検索

Touch Gate V1.0.0α1

### \* タグ検索

一覧へ戻る

ログアウト

検索

Copyright(c) 2015 LIFE CO., LTD. All Rights Reserved.

落ちているタグを発見した場合など、どの利用者に登録されていたものか調べることができます。

タグ表面のバーコードに記載されている数字を記入して「検索」ボタンをクリックすると、登録されているタグであれば利用者名が表示されます。